


Atelierul De Jaluzele

sistem CUBICLE




sistem CUBICLE

Intimitate si protectie in  
sistemul medical

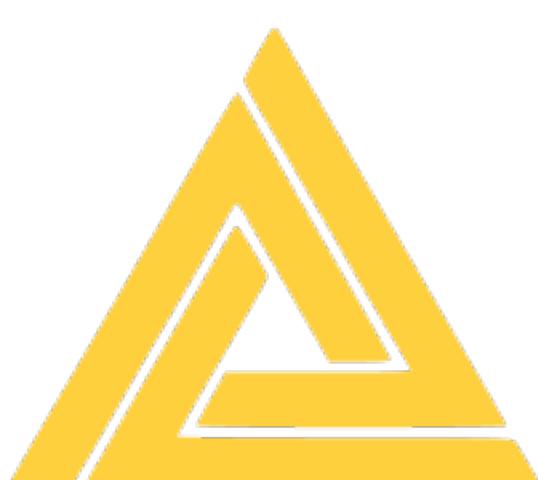

Atelierul De Jaluzele

sistem CUBICLE

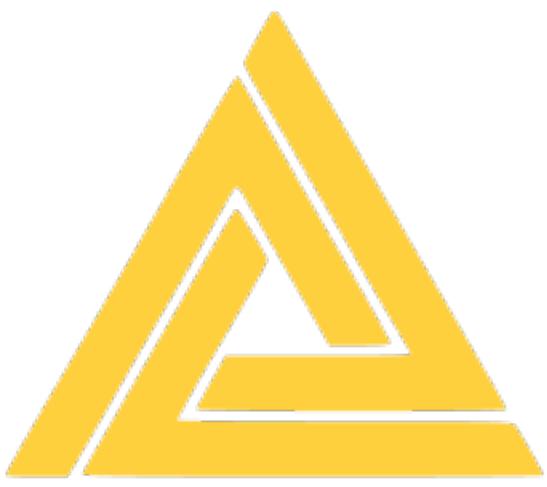

Atelierul De Jaluzele

sistem CUBICLE



spitalul romanesc  
**un spital european**

DIMENSIUNI PROFIL

15 x 33 mm

CULORI PROFIL

ALB

TIP ACTIONARE


fara actionare

**consola montaj in tavan**

OPTIONALE

**gaura patrata in profil**  
(pentru extragere usoara a carucioarelor)


**indoire profil la 90 grade**

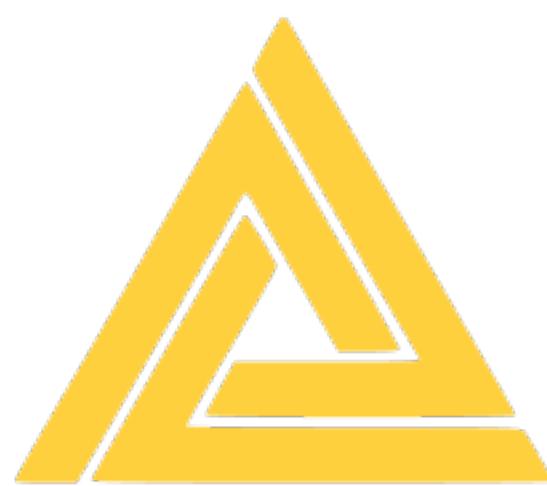

Atelierul De Jaluzele

sistem CUBICLE

## Accesorii

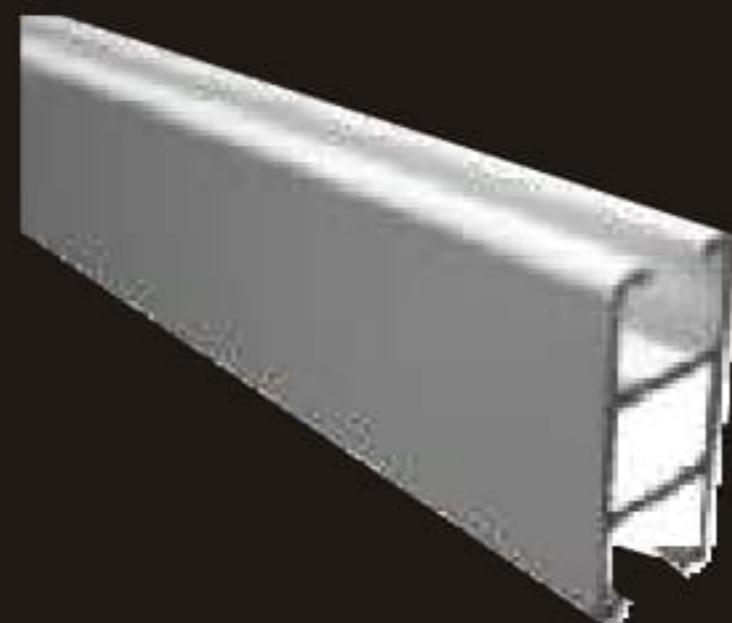

Sina Cubicle aluminiu

Dimensiuni:  
1,5cm x 3,3cm



Carucior cu carlig metalic



Opritor perdea



Consola montaj in perete, cap de sina




Element de imbinare sine

Lungime:  
10cm



Consola montaj in tavan

Dimensiuni:  
20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm

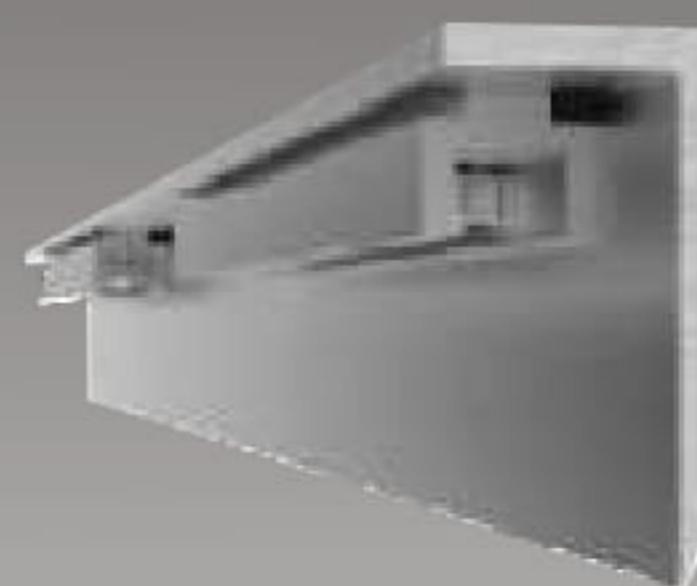


Punte de legatura sine


Dimensiune:  
30cm



Clema montaj in tavan

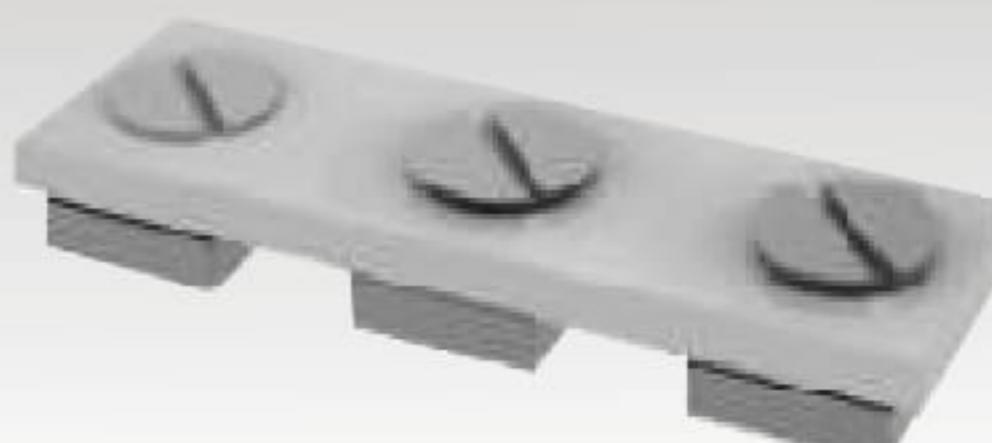


Element de imbinare sine in T

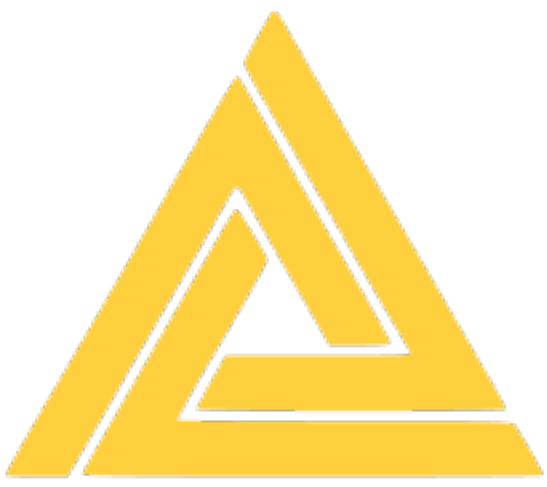


## Exemple constructii de montaj


A

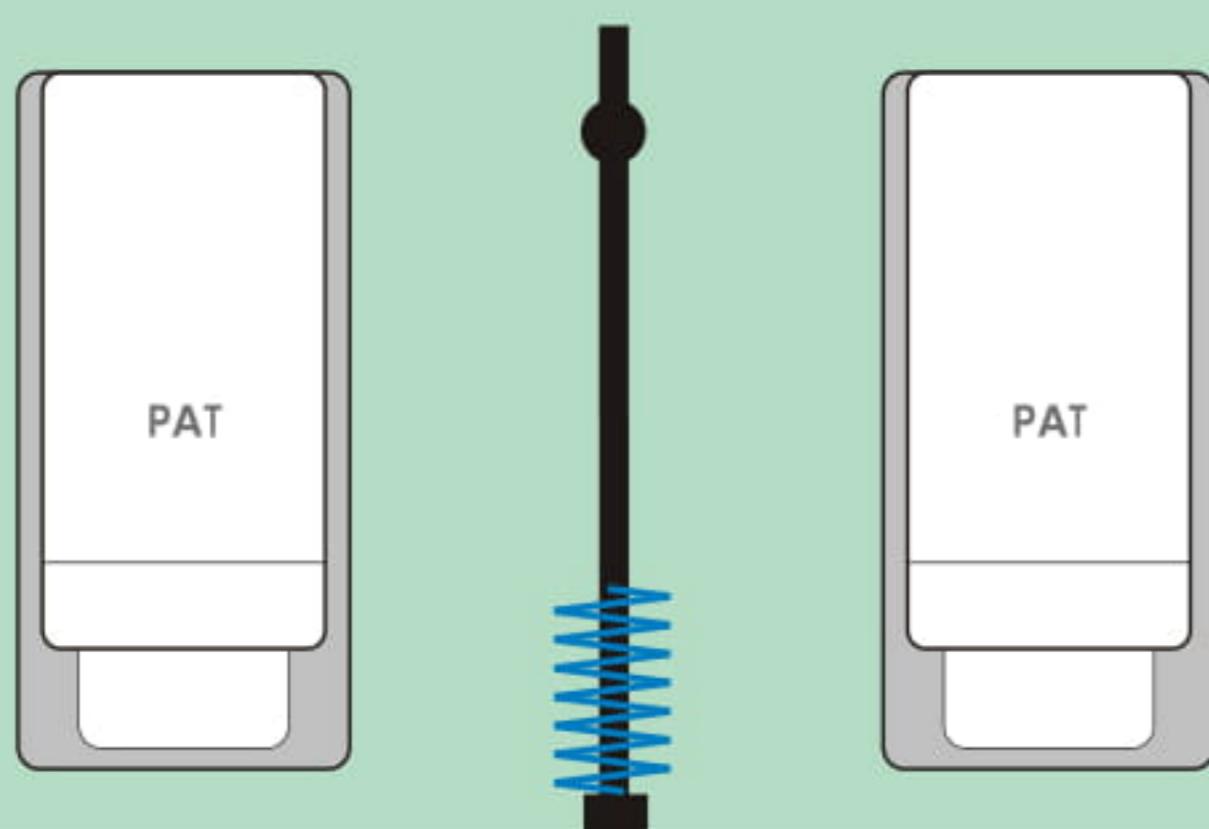


B

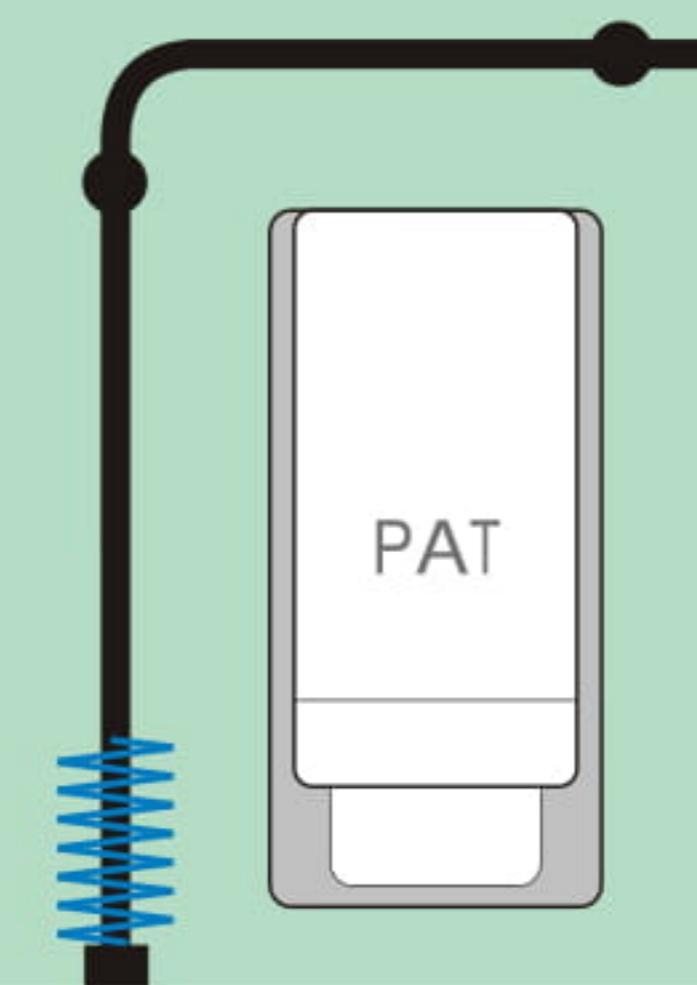


C

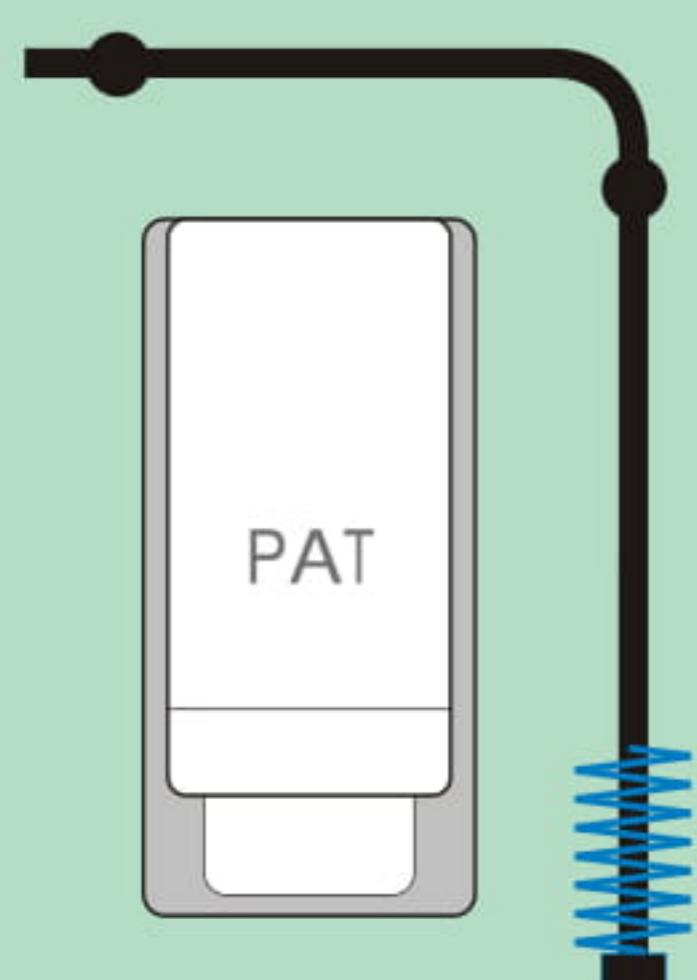


D

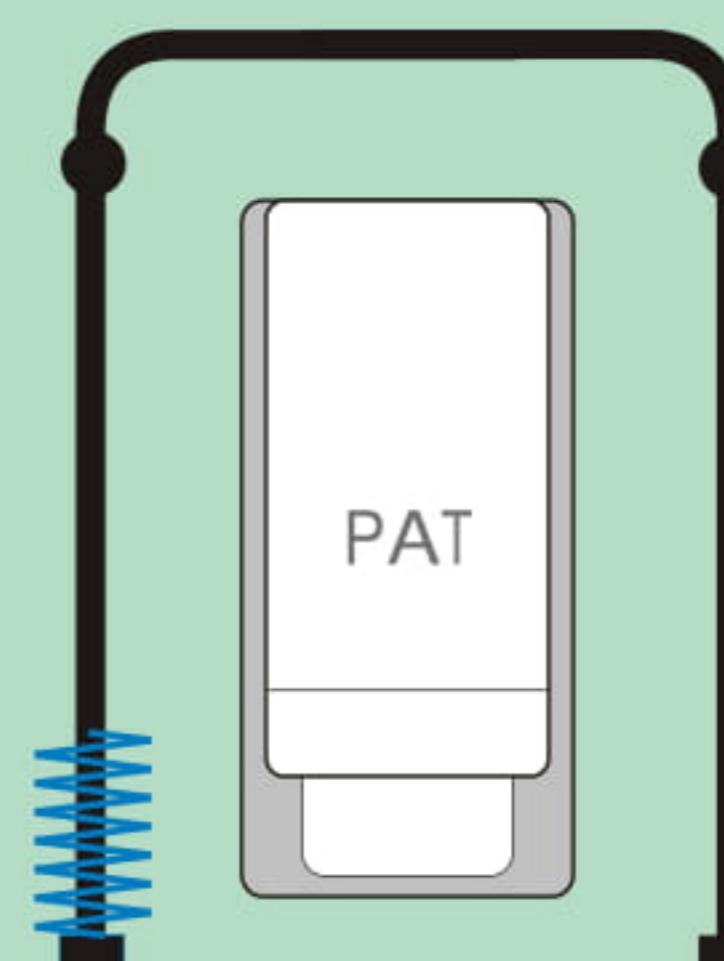


E

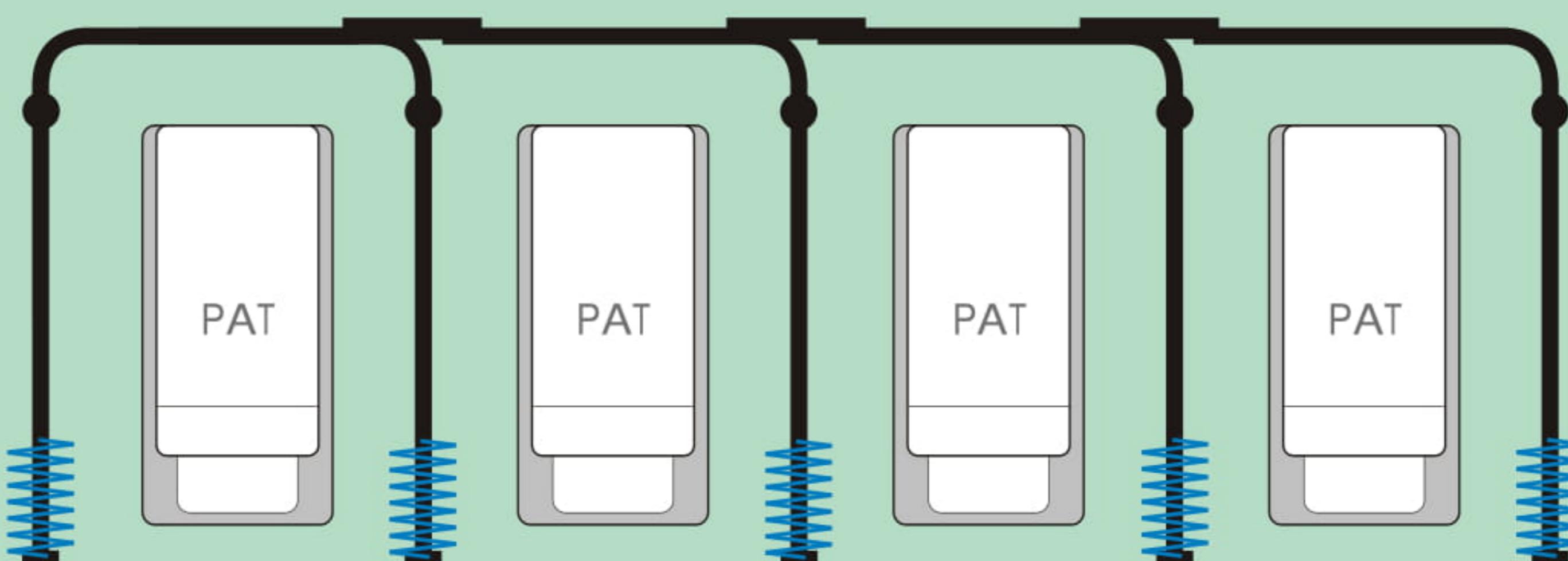

F

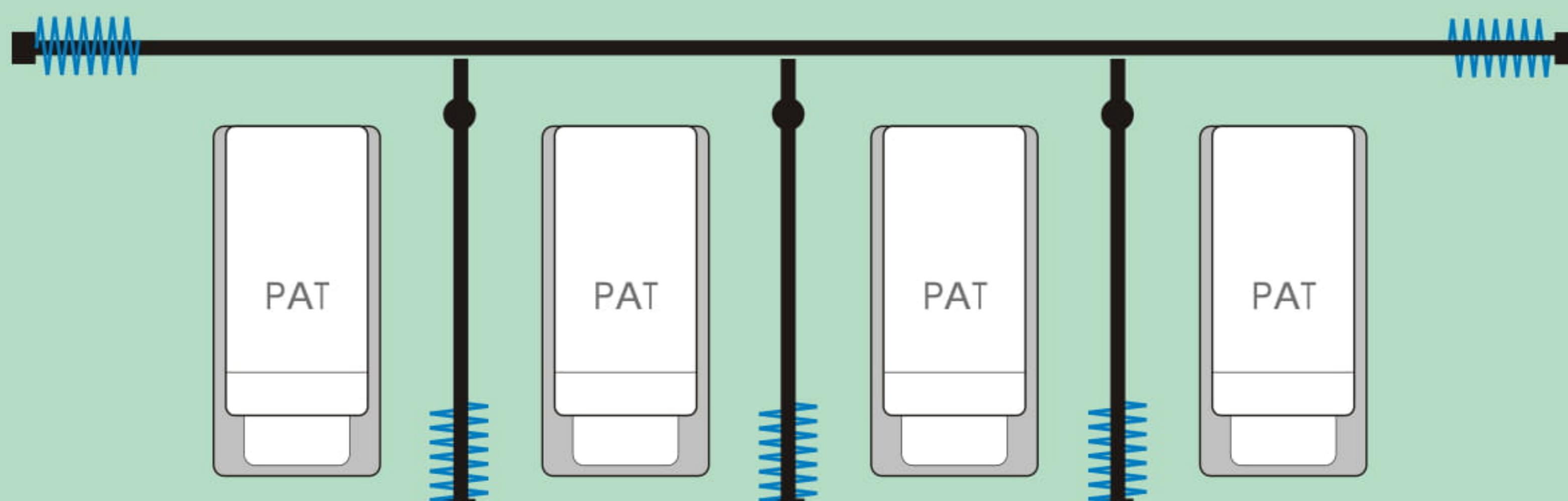

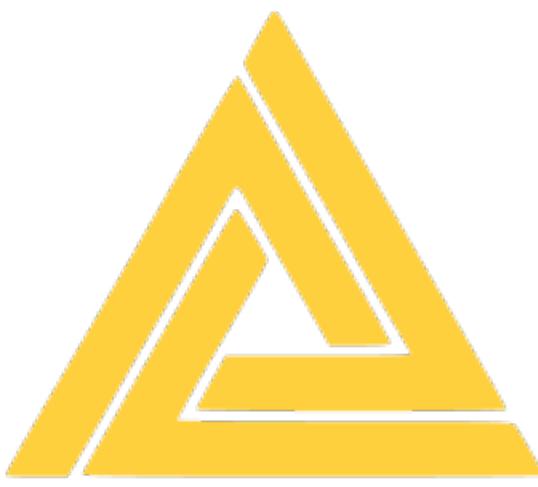

# sistem CUBICLE

Atelierul De Jaluzele



1 Introduceti carucioarele perdelei prin gaura prevazuta in sina

2 Dupa ce perdea este complet atarnata, indepartati folia de protectie

3 Completati data punerii in functiune, pentru o gestiune mai buna

4 Cand nu este folosita strangeti perdea la perete si o blocati cu cordonul atasat



## perdea Cubicle one use

Perdea este creata special pentru mediul sanitar si reuseste cu succes sa inlocuiasca perdea traditionala folosita in spitale. Aceasta este mult mai prietenoasa cu resursele financiare, avand un cost redus de achizitie si de intretinere. Datorita tratamentelor si proprietatilor acesteia, perdea are un rol esential in scaderea riscului de infectie in mediul spitalicesc.

igienic

ignifug

usor de inlocuit

antibacterial

100% reciclabil

cost redus

bs5867 - en iso 15025 2002



## Recomandare de folosire perdea in functie de zona de utilizare

### Zona cu risc scazut

reabilitare  
ingrijire pe termen lung  
cabinet medical  
centru medical

**Recomandare**  
perdeaua poate fi folosita  
**pana la 24 luni**

aceasta va fi schimbată ori de cate ori prezintă pete,  
spintecari sau la intervale mai mici prevazute de  
regulamentul intern al spitalului

### Zona cu risc semnificativ

sectii medicale generale  
saloane cu paturi

**Recomandare**  
perdeaua poate fi folosita  
**pana la 12 luni**

aceasta va fi schimbată ori de cate ori prezintă pete,  
spintecari sau la intervale mai mici prevazute de  
regulamentul intern al spitalului

### Zona cu risc ridicat

unitate primiri urgente (UPU)  
terapie intensiva  
sectii chirurgie  
spital copii

**Recomandare**  
perdeaua poate fi folosita  
**pana la 6 luni**

datorita traficului mare de vizitatori si numarului  
mare personal medical din acele locatii

aceasta va fi schimbată ori de cate ori prezintă pete,  
spintecari sau la intervale mai mici prevazute de  
regulamentul intern al spitalului

### Zona cu risc foarte mare

cabinete medicale de epidemiologie  
spitale de arsi  
focar de izbucnire a unei boli infectioase

**Recomandare**  
perdeaua trebuie schimbata imediat  
**dupa fiecare pacient**

deoarece in astfel de locatii riscul de contaminare este  
extrem de mare